

# Snabbmanual för alkoholmätare KY8600

## På och Avstängning

För att starta alkoholmätaren, håll ner ON/OFF-knappen tills instrumentet avger ett ljud. Skärmen kommer att startas.

För att stänga av, håll ner ON/OFF-knappen intryckt tills instrumentet avger ett ljud eller vänta till alkoholmätaren stänger av sig automatiskt efter 3 minuter.

## För att utföra en utandningskontroll

- Slå på alkoholmätaren enligt instruktionen ovan.
- Ta bort ett engångsmunstycke från skyddsplasten, lokalisera hålet i engångsmunstycket och sätt fast den i toppen av alkoholmätaren.
- Ta ett djupt andetag och blås, måttligt och kontinuerligt i munstycket i mer än 3 sekunder.
- En ljudsignal hörs under själva blåsningen för att indikera rätt flöde.
- När mätningen är klar så kommer testresultatet att visas.
- Om ingen alkohol upptäcks kommer lysdioden att bli grön. Om alkohol upptäcks lyser LED blått eller rött.
- Vänta minst 3 minuter för att utföra ett nytt utandningsprov.

## Vanliga fel och viktiga instruktioner

- Om utblåsningen *inte* görs på korrekt sätt eller om man slutar blåsa innan analys tiden är slut, så hörs en varningston och skärmen visar "blowing interrupted", testet bör då göras på nytt.
- Analysen tar några sekunder och beror på *mängden alkohol* i utandningsprovet. Om utandningstest görs utomhus i kallt väder den analyserar tid kan öka något.
- Vänta minst 3 *minuter* mellan två mätningar för att luften i apparaten ska hinna bytas ut.
- Kalibrera utrustningen minst *en gång om året*.

## Underhåll

- Rengör ytan på mätaren om så behövs, använd en fuktig trasa, använd inte starka kemiska rengöringsmedel (t.ex. alkohol etc.) för att rengöra ytan.

